

Q-Logic 3 Kurzanleitung



Einschalten:

-Drücken Sie den Wippschalter kurz nach vorne, um den Stuhl einzuschalten.

Start:

-Der Stuhl startet im langsamen Gang (Innen). Alternativ kann ein vom Außendienst hinterlegtes Symbol verwendet werden.

Gangwechsel:

-Erster Gangwechsel: Drücken Sie den Wippschalter nach vorne, um in den mittleren Gang (Innen) zu wechseln.

-Zweiter Gangwechsel: Drücken Sie erneut nach vorne, um in den mittleren Gang (Außen) zu gelangen.

-Dritter Gangwechsel: Drücken Sie nochmals nach vorne, um in den schnellen Gang (Außen) zu wechseln.

Zusatzmenü:

-Drücken Sie den Wippschalter erneut nach vorne, um das Zusatzmenü zu öffnen. Hier können Sie die Seriennummer anzeigen lassen oder den Haken für den Interactive Assist setzen. Um den Haken zu setzen, gehen Sie auf den entsprechenden Menüpunkt und drücken den Joystick nach rechts.

Sitzeinstellungen:

-Drücken Sie den Wippschalter wieder nach vorne, um die Sitzeinstellungen zu öffnen.

-Das gelb hinterlegte Element bewegt sich, wenn Sie den Joystick nach vorne oder hinten ziehen.

-Um die Funktion zu wechseln, drücken Sie den Joystick nach rechts oder links. Das gelb gekennzeichnete Element wechselt.

-Stellen Sie die gewünschte Position ein, indem Sie den Joystick vor- oder zurückziehen.

Zurück zum Fahrmodus:

-Drücken Sie den Wippschalter nach vorne, um zu den Fahreinstellungen zurückzukehren.

-Der Stuhl wechselt in den langsamen Gang (Innen).

Ausschalten:

-Drücken Sie den Wippschalter nach hinten, um den Stuhl auszuschalten.

Blinker:

-Drücken Sie die jeweiligen Knöpfe für Blinker rechts oder links, um die Blinker zu aktivieren. Zum Deaktivieren drücken Sie den Knopf erneut.

Licht:

-Das Licht wird durch Drücken des entsprechenden Knopfes aktiviert und durch erneutes Drücken deaktiviert.